

データ送信の手順

1. 心電計の裏側に記載しているハートケアセンターに電話をする。

音声ガイダンスのメッセージ：

「ハートケアセンターです。ピーという音の後に送信してください。
送信が終わりましたら、終了のメッセージをご確認ください。」
「ピー」

2. 「ピー」を聞き終えた後、電話口に心電計の裏側（穴の開いている方）をあて、
1・2・3とゆっくり数えてから、記録/送信ボタンを押す。

※ 音声ガイダンスからの「ピー」音を確実に聞き終え、1・2・3とゆっくり数える
ぐらい時間をおいてから、電話口に心電計裏側の穴の開いているところをあわせて、
記録/送信ボタンを押し、音が鳴り終わるまでそのまま送信して下さい。

※ 「ピー」音の後に間をおかずに送信すると
「通信状況が悪いため、シリアル番号がうまく受け取れません。」
というエラーメッセージが流れてしまいます。

※ もし、エラーメッセージが流れましたら、もう一度最初から送信してください。

※ 電話口と心電計裏側の穴の距離は、1cm以下になるように近づけて下さい。

3. 音が鳴り終わったら、再び音声ガイダンスを聞いてから、電話を切る。

（ FAXフリーモードの場合は音声ガイダンスの後に受信したいFAX番号を
市外局番から入力し、最後に#を押す。 ）

※ 送信終了後もすぐに電話を切らずに受信完了のメッセージを聞き、
「受信が完了しました。ありがとうございました。」
と聞こえたら、電話を切る。

※ 送信は通常1分以内に終わります。

※ ハート・ケアセンターが話し中の場合、しばらくたってから送信し直してください。

4. ハートケアセンターから記録を受信する

ハートケアライフ株式会社

〒321-0974 栃木県宇都宮市竹林町691
TEL 028-622-0731 FAX 028-616-1182